



IMPORTADORA

ROYAL PLUS

— IMPORT —

Símbolo de Seguridad



COLLARIN CERVICAL— CÓD: CCR

01 DESCRIPCIÓN

Collarín cervical ajustable y de colocación fácil y rápida. El material interior es suave y hace que el paciente se sienta cómodo, evitando lesiones secundarias. Este producto se utiliza preventivamente en todos los pacientes que presentan una lesión (ya sea contusa o penetrante).

02 MATERIAL

- Manufacturado en espuma de etileno, acetato de vinilo.
- Velcro, fibra sintética.
- Fabricado sin látex

Apoyo mentón

Apoyo occipital



4 posiciones de regulación
(Tall, Regular, Short y No-neck)

Sistema de seguros

Apoyo mandíbula



Apoyo trapecio

Apoyo esternón

03 CARACTERÍSTICAS

- Colocación fácil y rápida.
- Ajustable en cuatro niveles diferentes.
- Presenta sistema de seguros para los distintos tamaños de cuello.
- Compatible con rayos X, resonancias magnéticas y tomografías computacionales.
- Tiene un orificio para control de tráquea y pulso carotídeo

Centro Comercial Plaza Ferretero "Las Malvinas"
Av. Guillermo Dansey N°411 Tienda 1097 (Pasaje B 1er Piso)
Telf. 976 329 474 / 957 351 408

www.royalplusimport.com



IMPORTADORA

Royal Plus
— IMPORT —

Símbolo de Seguridad



04 ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIÓN	MEDIDAS
• Largo	560 mm
• Ancho	190 mm
• Altura	40 mm
• Peso	0,2 kg

ALMACENAMIENTO	
• Rango de temperaturas de almacenamiento.	-34 °C a 52 °C
• Rango de temperaturas de trabajo.	-25 °C a 43 °C
• No almacenar el collarín en posición plegada.	
• Almacenar en posición plana.	

05 APLICACIONES

Rescate, Triturado, Industria, Mantención,
Aserrado, Bomberos, Empacado, Cementos,
Agroquímicos, Construcción, Minería,
Alimenticia, Hospitalaria, Canteras,
Automotriz, Cruz Roja, Obra Civil



Centro Comercial Plaza Ferretero "Las Malvinas"
Av. Guillermo Dansey N°411 Tienda 1097 (Pasaje B 1er Piso)
Telf. 976 329 474 / 957 351 408

www.royalplusimport.com



IMPORTADORA

ROYAL PLUS
— IMPORT —

Símbolo de Seguridad



06 COLOCACIÓN DEL COLLARIN


1. Para su colocación son imprescindibles dos personas. La primera persona, explora el cuello buscando posibles cambios de coloración, deformidades, pulsos carotídeos.



2. Para su colocación son imprescindibles dos personas. La primera persona, explora el cuello buscando posibles cambios de coloración, deformidades, pulsos carotídeos.



3. Para su colocación son imprescindibles dos personas. La primera persona, explora el cuello buscando posibles cambios de coloración, deformidades, pulsos carotídeos.

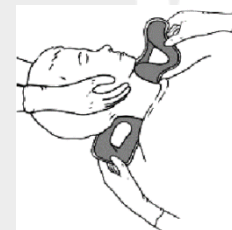

4. Comprobar la correcta colocación del collarín, ajustar alrededor del cuello y cerrar el velcro del collarín, que los medios de fijación estén firmes y tengan una adecuada presión de cierre



Centro Comercial Plaza Ferretero “Las Malvinas”
Av. Guillermo Dansey N°411 Tienda 1097 (Pasaje B 1er Piso)
Telf. 976 329 474 / 957 351 408

www.royalplusimport.com