



IMPORTADORA

ROYAL PLUS
— IMPORT —

Símbolo de Seguridad



IMNOVILIZADOR DE CABEZA— CÓD: INM-CAB

01 DESCRIPCIÓN

Inmovilizador de cabeza, diseñado para brindar soporte a la zona cervical del paciente y así evitar daños mayores en caso de lesiones. Es perfecto para ser utilizado en tablas espinales, fabricado en espuma de alta densidad con terminación engomada que permite permeabilidad completa del equipo.

02 MATERIAL

- Fabricado en espuma de alta densidad recubierta por engomado Hidrofuga.
- Ajustable con velcro de alta duración.
- Parte posterior con refuerzo acolchado.



03 CARACTERÍSTICAS

- Material Hipoalergénico.
- Lavable y reutilizable.
- No absorbe sangre ni fluidos corporales.
- Evita la acumulación de bacterias.
- Desmontable y ajustable.
- Translucido: No interfiere con rayos X, resonancia magnética o procedimientos CT

Centro Comercial Plaza Ferretero “Las Malvinas”
Av. Guillermo Dansey N°411 Tienda 1097 (Pasaje B 1er Piso)
Telf. 976 329 474 / 957 351 408

www.royalplusimport.com



IMPORTADORA

Royal Plus

IMPORT

Símbolo de Seguridad



04 ESPECIFICACIONES TECNICAS

| ESPECIFICACIÓN | MEDIDAS | |
|----------------|-------------|--------|
| ● Longitud | 15 pulgadas | 40 cm |
| ● Ancho | 10 pulgadas | 26 cm |
| ● Altura | 7 pulgadas | 17 cm |
| ● Peso | 2lns | 0,9 kg |

05 APLICACIONES

Rescate, Triturado, Industria,
Mantenión, Aserrado, Bomberos,
Empacado, Cementos,
Agroquímicos, Construcción,
Minería, Alimenticia, Hospitalaria,
Canteras, Automotriz, Cruz Roja,
Obra Civil.




Centro Comercial Plaza Ferretero "Las Malvinas"
Av. Guillermo Dansey N°411 Tienda 1097 (Pasaje B 1er Piso)
Telf. 976 329 474 / 957 351 408


www.royalplusimport.com

06 COMO USAR EL INMOVILIZADOR

- 1.** Colocar la cabeza inmovilizadora en la parte posterior. Utiliza dos correas de base largas y correa de retención superior para fijar el plato base.

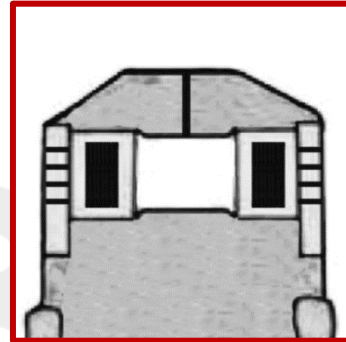

- 2.** Colocar al paciente en la parte trasera. Fija la cabeza del paciente con dos almohadillas para la cabeza.

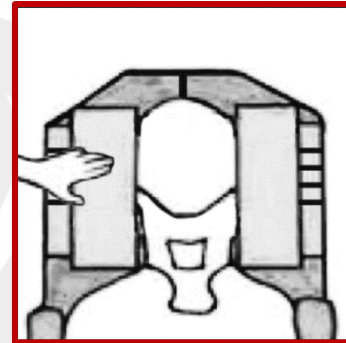

- 3.** Fijar la cabeza del paciente con dos correas para la frente y mentón. Fija el cuerpo del paciente con correa y transferencia de accesorios.

